# パラマウントベッド株式会社 マットレス詳細仕様書

## 1. 品名

エバーリーフシャインマットレス

## 2. 製品規格番号

KE-593SA

#### 3. 概要

- (1)本マットレスは、両面で硬さの異なるリバーシブル仕様である
- (2)ソフト面(やわらかい面)は優れた体圧分散性を備え、ハード面(かたい面)はからだをしっかり支える硬さを備える
- (3)動きやすさと寝姿勢に配慮したポリエステル繊維とウレタンフォームのハイブリッド 四層構造である
- (4)防水・低透湿加工を施したカバーにより清拭消毒を可能とし、カバーの抗菌加工とともに、感染予防に配慮している
- (5)寸法(詳細は別紙図面による)

## 4.各部の構成・機能

## 4.1 生地 (カバー)

- (1)ソフト面とハード面で認識しやすいよう生地はツートン色である
- (2)生地は抗菌 (MRSA)・難燃・防水機能を持ち、伸縮加工を施したポリエステル繊維 100%によるニット品で、表面にポリウレタンフィルムを有する
- (3)表面のポリウレタンフィルムは平滑性を有しており、ベッドギャッヂ時に発生する 擦れ音が少ない
- (4)詰め物の出し入れとカバー交換を可能とするため、ファスナーを配する。ファスナー部からの浸水を防ぐために、ファスナーには止水加工を施す
- (5)持ち運び用に片側長手1箇所に取っ手を配する(KE-596Sを除く)

## 4.2 詰め物 (4層構造)

- (1)詰め物は難燃性を有する
- (2)ソフト面側からウレタン層2層、ポリエステル層、ウレタン層と4層構造である
- (3)ポリエステル層は再生ポリエステルを含むポリエステル繊維100%のシート層を 連続的に折りたたみ加工した、曲がりやすい構造体を厚みを半切したものであり、背部、 臀部、脚部にスリット加工を施し体圧分散性を配慮したクッション材である
- (4)ソフト面側から2層目の幅方向両端部には中央よりも硬いウレタンを配置し、端坐位安定性

を配慮している

(5)カバーの四隅には、シーツ等を固定するための、リバーシブルで使用可能なリネンストッパーを配置し、シーツ等の固定を容易にし、シーツ等の張りすぎによる体圧分散性の低下を防ぐことを可能とする